


# Berrcom® 倍尔康 婴儿吸鼻器 说明书

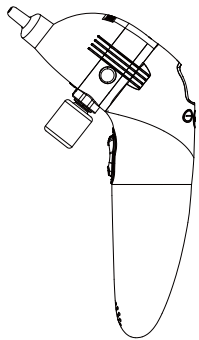

NC004

## 目录

安全说明	2
适用范围	2
使用前注意事项	2
产品特点	2
产品简介	3
技术性能	3
产品装配	4
产品使用方法	4
电池更换	5
产品保存贴士	6
产品附件	6
疑难解答	6
保修条例	7

运营商：广州市倍尔康医疗器械有限公司 制造商：广州市倍尔康医疗器械有限公司  
 销售热线：020-34803118 生产地址：广州市南沙区大岗镇环镇西路38号  
 传真：020-34802683 (生产大楼)  
 售后服务专线：400-886-3868 电话：020-34938449  
 http://www.berrcom.com 网址：020-34936960  
 产品标准编号：Q/JXB 01-2018 邮编：511470

V.05 2018

感谢您购买倍尔康婴儿吸鼻器。为了能够安全的使用本产品，使用前请务必阅读使用说明书。阅读时请妥善保管，以便随时查阅、参考。本产品适用于家庭使用，用于清除婴儿鼻腔分泌物。不能用于疾病的治疗，有关疾病的相关问题，请咨询医生。

- 安全说明**
1. 本产品仅用于清洁婴儿鼻腔的鼻涕及衍生物，不能另做它用。
  2. 请使用厂家提供的配件。
  3. 请避免本产品受到剧烈压迫、碰撞或意外摔落地面。
  4. 请使用碱性电池，不要使用充电电池。
  5. 当两周不使用时，请取出电池，防止漏液损坏产品。请按说明书指示装电池。

**适用范围**  
 本产品适用于在家庭帮助吸出非病理状态下婴儿的流涕鼻涕或衍生物。

- 使用前注意事项**
1. 请不要忘记使用前将吸鼻嘴、透明罩消毒，建议用沸水浸泡数分钟，不能使用微波炉等高温杀毒。
  2. 不能将产品整个浸泡到液体中。
  3. 请检查密封圈是否有破损和装配不到位。
  4. 在使用前请操作者洗手。
  5. 本产品的运行模式是连续运行。为延长电池使用寿命，建议至多连续运行10分钟，停机5分钟后再次使用。
  6. 当吸力明显不足时，请更换新的电池。

**产品特点**  
 三种规格吸鼻嘴，可供选择。  
 采用一次性使用吸塑杯，使用方便，安全卫生。

可以轻松保持婴儿鼻腔干净。  
 防漏水设计。  
 新增生理盐水清洗功能，能有效清洁鼻腔。

本产品是一款全新的婴儿清洁产品，它柔软、高效，易清洁。一岁以下的婴儿只能通过鼻腔呼吸，因此能通过使用本产品定期清洁鼻腔产生的分泌物来保持鼻腔通畅。


**产品简介**  
 本产品主要由吸鼻嘴、一次性使用吸塑杯、线路控制组件、气泵组件、外壳组件等组成。



**技术性能**

1. 正常使用条件：环境温度：10℃~40℃，相对湿度：≤85%
2. 电源：DC 3V (2节5号碱性电池)
3. 产品尺寸：196mmx 86mmx 53mm
4. 产品重量：190g (不含电池)
5. 最大负压值：58kPa
6. 一次性吸塑杯最大容量：5ml

- 产品装配**
1. 装上电池，合上电池盒①(当第一次使用时)，放入一个一次性使用吸塑杯④于一次性使用吸鼻杯座③中。
  2. 确保密封圈②装配到位，让婴儿吸鼻器有效封气。
  3. 按箭头方向旋转透明罩⑤，并转动至箭头标识相对位置。
  4. 装入吸鼻嘴⑥。
  5. 把装有生理盐水(约5ml)的盐水瓶⑦旋转进入吸鼻器。

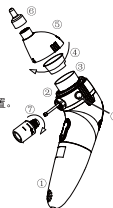

- 产品使用方法**
1. 按开关上的“1”启动本产品。
  2. 把吸鼻嘴小心的放到鼻腔外缘。(注意：需要先把头微微抬起)
  3. 点动喷水按钮⑧到2秒，生理盐水从婴儿吸鼻器中喷入鼻孔中，清洗鼻腔。当松开喷水按钮，婴儿吸鼻器自动通过吸孔把鼻腔中的脏物吸走。
  4. 重复进行以上操作，对鼻腔可进行有效清洗。

**根据需要更换一次性使用吸塑杯。**  
 不要一次性吸入过量的生理盐水。

- 注意：**
1. 当产品两周不用时请取出电池，防止漏液损坏产品。
  2. 重新装配密封圈时，密封圈装配后周边需装配均匀，同时把密封圈周边异物清理干净，否则均会影响产品品质。

- 电池更换**
1. 用力拉开婴儿吸鼻器电池盖。
  2. 装入两节5号碱性电池并确保极性正确。(请不要使用可充电电池，请不要新旧电池混合使用。)



3. 装上电池盖。

- 警告：**在使用生理盐水时，大量的液体鼻腔混合分泌物有可能会进入空气管，请确保混合物全部被婴儿吸鼻器吸走。  
 警告：装在吸鼻器上盐水瓶中的生理盐水不要超过24小时。  
 警告：不能用热水或高温方法清洗盐水瓶。否则盐水瓶会变形。  
 警告：使用过程中，确保婴儿躺平，保证鼻腔内空气流通，以免在头部形成负压，产生不适。  
 警告：婴儿吸鼻器工作时，不要一直堵塞另一鼻孔，以免在头部形成负压，产生不适。  
 警告：每次使用后，需清洁产品。  
 警告：不要将整个产品浸入液体中。  
 警告：使用前对吸鼻嘴/透明罩进行消毒，以防交叉感染。  
 警告：产品无防逆流装置，婴儿吸鼻器工作时需装一次性使用吸塑杯，为防止产品把鼻水吸入产品内部，损坏产品。  
 警告：当一次性使用吸塑杯中液体有三分之二时需要换一次性使用吸塑杯或清除一次性使用吸塑杯中液体，防止液体流入产品内部，损坏产品。  
 警告：用户在用沸水或蒸汽清洗吸鼻嘴时，应把吸鼻嘴半制内的水渍清理干净，防止婴儿吸鼻器工作时把水渍吸入产品内部，损坏产品。

**警告：**婴儿吸鼻器在工作时或一次性使用吸塑杯有液体时，不能倒置产品，防止液体流入产品内部，损坏产品(如右图)。



- 产品保存贴士**
1. 请用清洁剂(如酒精、洗洁精)清洁本产品。
  2. 你可以用沸水或蒸汽对拆下部分(吸鼻嘴/透明罩)进行消毒，但不能在微波炉内消毒。
  3. 消毒后，请用柔软的干布清洁产品。
  4. 避免在日光直射和潮湿的环境中存放产品。
  5. 避免使用含有腐蚀性化学物品清洗产品。

- 产品附件**
- |          |     |
|----------|-----|
| 吸鼻嘴      | 3个  |
| 密封圈(备用)  | 2个  |
| 盐水瓶      | 3个  |
| 一次性使用吸塑杯 | 25个 |
| 5号电池     | 2节  |
| 说明书      | 1份  |
| 合格证卡     | 1张  |

**疑难解答**  
 如有下述问题出现，请根据疑难解答指引解决，如解决了，请联系我们售后服务。

问题	解决方法
没有吸力	1.检查密封圈的位置 2.检查透明罩是否到位 3.检查吸鼻嘴是否到位
按开关没有反应	检查电池极性
不喷生理盐水	检查盐水瓶是否拧紧

- 保修条例**
1. 本产品从购买当日起，凭购物发票享受2年免费保修。
  2. 我方对因下列使用者个人的原因造成的故障将不提供免费保修服务。  
 (A) 擅自拆装，改装产品造成的故障；  
 (B) 在使用、搬运过程中不慎跌落造成的故障；  
 (C) 因缺乏合理的保养而造成的故障；  
 (D) 没有按照使用说明书的正确指示进行操作而造成的故障；  
 (E) 因非我司授权的维修店的不良修理而造成的故障等。
  3. 保修范围外的维修服务，将按照规定收费。
  4. 在要求提供保修服务时，请咨询售后服务部。
  5. 保证产品停产5年内继续提供维修配件。
- 注意：**  
 请妥善保管保留此卡，需要维修时，凭此卡和发票与本公司客服中心联系。电话：400-886-3868。

**保修登记卡**

产品型号：NC004 机身码：\_\_\_\_\_

销售店名：\_\_\_\_\_

用户姓名：\_\_\_\_\_ 购买日期：\_\_\_\_\_

用户电话：\_\_\_\_\_

用户地址：\_\_\_\_\_

售后服务单位：广州市倍尔康医疗器械有限公司  
 地址：广州市南沙区大岗镇环镇西路38号 (生产大楼)  
 电话：020-34938449  
 传真：020-34936960  
 邮编：511470

售后服务专线  
 400-886-3868

周一至周五 8:00-20:00  
 周六 8:00-17:00

正反黑白印刷。  
 外围实线为边缘刀线，尺寸为280x210mm；  
 中间虚线为折叠线，需要去掉后印刷；  
 折叠后的尺寸：140x105mm。  
 用170x120mm封口胶袋包装

技术要求：WEEE印出来的最小尺寸必需大于等于7mm。



产品编号 Item No.	ONC004+0AB001	产品名称 Item Name	婴儿吸鼻器	日期 Date
材料 Material	105g双铜纸	设计 Design		
公差 Tolerance	±1mm	审核 Check		
比例 Scale	1:1	批准 Approve		

版本 REV	描述 Description	签名 Sign	日期 Date
广州市金鑫宝电子有限公司 Guangzhou Jinxinbao Electronic Co., Ltd			
零件名称 Part Name	<b>说明书</b>		
零件编号 Part No.	ONC004+007+D145		
		Unit:mm	REV: B0
		Page	1 of 1

发放部门	工程部	装配车间	注塑车间	波浪床车间	洁净车间	贴片车间	移印车间	品管部	国内市场部	国内市场部	物控部	仓库部	文控中心
------	-----	------	------	-------	------	------	------	-----	-------	-------	-----	-----	------